

FAQ (Frequently asked questions) – ORBAT sensitive

Frage	Antwort
Ist ORBAT sensitive apothekenpflichtig?	nein
Ist ORBAT sensitive verschreibungspflichtig?	nein
Ist ORBAT sensitive gesondert abrechenbar?	nein; eventuell abrechenbare Indikation ist als Hämostyptikum bzw. als Hämostatikum
Ist ORBAT sensitive ein Medizinprodukt?	Ja
Hat ORBAT sensitive eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Nein
Hat ORBAT sensitive einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Ja, ist auf Faltschachtel aufgedruckt (4 260097 033275)
Gibt es für ORBAT sensitive ein Sicherheitsdatenblatt (SDB)?	bisher nicht, ist jedoch in Vorbereitung
Gibt es Veröffentlichungen zu ORBAT sensitive?	Anwenderbericht
Wie lange ist ORBAT sensitive haltbar?	3 Jahre ab Herstellung (siehe Angaben auf Etikett und Faltschachtel)
Wirkt ORBAT sensitive gleich wie ORBAT?	ja, es ist sogar etwas sanfter zum Zahnfleisch
Was ist der Unterschied zu ORBAT ?	ORBAT sensitive enthält Aluminiumsulfat, ORBAT enthielt Aluminiumchlorat; beide Salze wirken ähnlich
Wirkt ORBAT sensitive gleich wie ORBAT forte?	ORBAT sensitive stillt Kapillarblutungen weniger gut als ORBAT forte, welches koagulierend wirkt. Es ist im Gegensatz zu ORBAT forte jedoch farblos und es besteht daher nicht die Gefahr einer Verfärbung von Zahnfleisch, Zahn oder Restauration.
Was ist der Unterschied zu ORBAT forte?	ORBAT sensitive enthält 20 % Aluminiumsulfat und ist eine wässrige Lösung. ORBAT forte enthält 20% Eisen(III)sulfat und ist eine viskose Lösung (Flüssig-Gel).
Wirkt ORBAT sensitive auch blutstillend?	ja, bei <u>leichten</u> Zahnfleischblutungen (Kapillarblutungen); bei stärkeren Kapillarblutungen kann dann ORBAT forte mit Eisen(III)sulfat angewandt werden
Kann der Geschmack verbessert werden?	Alle Retraktionslösungen mit Eisen- oder Aluminiumsalzlösungen haben einen ähnlichen Geschmack. Dieser kann durch Aromazusatz nur geringfügig verändert werden.
Gibt es ein Produkt mit besserem Geschmack?	nein
Was muss ich tun, wenn mir (oder dem Patienten) ORBAT sensitive ins Auge gespritzt ist?	Sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Optimal wäre die Benutzung einer Augenwaschflasche. Bei Bedarf (und zur Sicherheit) anschließend einen Arzt bzw. Augenarzt konsultieren.
Gibt es ORBAT sensitive noch in der Glasflasche?	Nein. Die neue Tropfflasche ist besser zur Dosierung und Handhabung geeignet.
Ich verwende ORBAT sensitive im Medi-Spender und bekomme Probleme durch Salzkristalle und Verstopfen. Diese gab es bei ORBAT nicht.	<u>ORBAT sensitive sollte üblicherweise in der Originalflasche aufbewahrt und nur zum sofortigen Gebrauch entnommen werden.</u> ORBAT sensitive ist wie ORBAT eine Salzlösung, jedoch etwas konzentrierter. Dadurch kann es in offenen Gefäßen durch Feuchtigkeitsverlust zur Bildung von Salzkristallen kommen. Bei ORBAT sensitive schneller als früher beim ORBAT. Dies kann verhindert werden, indem die Lösung im Medi-Spender z.B. täglich gewechselt wird. Weitere Tipps: Neue Glasgefäße neigen wegen ihrer noch glatten Glaswände weniger zur Auskristallisation von Salzlösungen als alte. Der Ausgießer beim Medi-Spender kann durch einen kleinen Silikonstopfen oder Überzieher bei Nichtbenutzung verschlossen werden, um das Eintrocknen zu verhindern.