



Fachinformation

CHX-Endo 2%

Hersteller

CE

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

Bezeichnung

CHX-Endo 2%
Reinigungslösung
Nur für zahnärztlichen Gebrauch

Zusammensetzung

Lösung enthält Chlorhexidindigluconat, Tensid, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete

Zur Säuberung und Keimzahlverminderung von verunreinigten Wurzelkanalinstrumenten während der endodontischen Behandlung.

Gegenanzeigen

Allergie gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Art der Anwendung

Geeignetes Gefäß - wie z.B. den Arbeitständer für die Endofeilen – mit CHX-Endo 2% füllen und mit der dazugehörigen Schaumstoffscheibe abdecken. Die während der Behandlung verwendeten Endofeilen, -bohrer etc. werden dort abgelegt und gleichzeitig durch den Kontakt mit der Lösung gereinigt.

Die enthaltenen Tenside sorgen für die schnelle, rückstandsfreie Ablösung von Dentinresten, Smear layer und sonstiger organischer Rückstände auf dem Instrument. Durch die zusätzlich vorhandene antibakterielle Wirksamkeit des Chlorhexidins gegenüber den meisten unerwünschten Endobakterien und -pilzen wird auch deren Keimzahl stark vermindert. Ein zusätzliches Abspülen ist nicht erforderlich. Die Endo-Instrumente sind während der Behandlung direkt wieder verwendbar.

Nach der Behandlung müssen die verwendeten Instrumente und Behälter, die nicht zum Einmalgebrauch gedacht sind, nach Vorschrift (Reinigung, Desinfektion, Sterilisation etc.) aufgearbeitet werden.

Weitere Hinweise

Chlorhexidin-haltige Produkte dürfen nicht mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten gemischt werden, da sich sonst ein schwerlöslicher, rotbrauner Niederschlag bildet.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Haltbarkeit

CHX-Endo 2% soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen

50 ml Lösung
200 ml Lösung
500 ml Lösung

Stand der Information

Juli 2010

Symbol für "Verwendbar bis"



Symbol für "Chargenbezeichnung"



Symbol für "Gebrauchsanweisung beachten"



0026333\Stückzahl0710\Bestelldatum