



Fachinformation

## **REMOT implant**

**RDA < 7\* - fein**



### **Hersteller**

**lege artis** Pharma GmbH + Co. KG  
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen  
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen  
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0  
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50  
E-Mail: [info@legeartis.de](mailto:info@legeartis.de)  
[www.legeartis.de](http://www.legeartis.de)

### **Bezeichnung**

“*REMOT implant*“ Implantat-Reinigungspaste  
Für schonendes Biofilm-Management

### **Zusammensetzung**

Wasser, Macrogole (Konsistenzgeber), Glycerol und Sorbitol (Süßungs- und Feuchthaltemittel), Silica (Abrasion), Pfefferminzöl (Aroma), Xylitol und Chlorhexidinsalz (Keimreduktion), Hilfsstoffe (Pigment, Benetzungsmittel)

### **Anwendungsgebiete**

“*REMOT implant*“ beseitigt Plaque und Keime an Implantaten, deren Aufbauten, sowie Zähnen und anliegendem Zahnfleisch und beugt dadurch der Entstehung von Zahnfleischerkrankungen (Periimplantitis, Parodontitis) und Karies vor. Auch für die Endpolitur geeignet.

### **Professionelle Pflege und Prävention**

Hochwertige Implantate und deren Aufbauten aus Keramik, Kunststoff oder Metall benötigen, ebenso wie die natürlichen Zähne, effektives Biofilm-Management. Deshalb ist eine stetige professionelle Pflege sehr wichtig. Dies kommt dann der Gesundheit der Gingiva und der natürlichen Zähne ebenso zugute wie dem ästhetischen Gesamtbild. Mit der Polierpaste “*REMOT implant*“ pflegen Sie die Implantate, deren Aufbauten und auch alle empfindlichen Oberflächen optimal und äußerst schonend. Der sehr niedrige RDA - Wert von < 7<sup>\*</sup> gibt Ihnen dabei die nötige Sicherheit.

### **Hinweis**

Die Implantat-Reinigungspaste “*REMOT implant*“ hat einen angenehm frischen Pfefferminzgeschmack. Sie reinigt Implantat und Zähne äußerst sanft und verleiht Ihnen natürlichen Glanz.

Mit Chlorhexidin und Xylitol.

Fluoridfrei  
Ohne Bimsstein  
Keine zusätzlichen Konservierungsstoffe

### Haltbarkeit

“REMOT implant“ soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

### Darreichungsform und Packungsgröße

Tube mit 27 g Paste

### Stand der Information

Juli 2010

Symbol für “Verwendbar bis”



Symbol für “Chargenbezeichnung”



Symbol für “Gebrauchsanweisung beachten”



0026337/Stückzahl0710/Bestelldatum

---

\* **Methode nach Stookey/Schemehorn mit Referenzsubstanz Bimsstein für Prophylaxepasten**  
Literatur: Stookey GK, Schemehorn BR: A Method for Assessing the relative Abrasion of Prophylaxis Materials. J Dent Res 1979; 58:588.

Erhaltene RDA-Werte: <7 für “REMOT implant“ und 7 für Produkt „P“ Abrasionsgrad fein (rosa)

Zum Vergleich:

**Methode nach Hefferen mit Referenzsubstanz Calciumpyrophosphat für Zahnpasten**  
Literatur: harmonisierte Norm „Zahnpasten – Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung“ DIN EN ISO 11609:1998

Erhaltene RDA-Werte: 66 für “REMOT implant“, 71 für Produkt „P“ Abrasionsgrad fein (rosa) und 106 für REMOT