



Fachinformation

CHX-Endo 2%

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

CE

Bezeichnung

CHX-Endo 2%
Reinigungslösung
Nur für zahnärztlichen Gebrauch

Zusammensetzung

Lösung enthält Chlorhexidindigluconat, Tensid, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete

Zur Säuberung und Keimzahlverminderung von verunreinigten Wurzelkanalinstrumenten während der endodontischen Behandlung.

Gegenanzeigen

Allergie gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Art der Anwendung

Geeignetes Gefäß - wie z.B. den Arbeitständer für die Endofeilen- mit CHX-Endo 2% füllen und mit der dazugehörigen Schaumstoffscheibe abdecken. Die während der Behandlung verwendeten Endofeilen, -bohrer etc. werden dort abgelegt und gleichzeitig durch den Kontakt mit der Lösung gereinigt.

Die enthaltenen Tenside sorgen für die schnelle, rückstandsfreie Ablösung von Dentinresten, Smear layer und sonstiger organischer Rückstände auf dem Instrument. Durch die zusätzlich vorhandene antibakterielle Wirksamkeit des Chlorhexidins gegenüber den meisten unerwünschten Endobakterien und -pilzen wird auch deren Keimzahl stark vermindert. Ein zusätzliches Abspülen ist nicht erforderlich. Die Endo-Instrumente sind während der Behandlung direkt wieder verwendbar.

Nach der Behandlung müssen die verwendeten Instrumente und Behälter, die nicht zum Einmalgebrauch gedacht sind, nach Vorschrift (Reinigung, Desinfektion, Sterilisation etc.) aufgearbeitet werden.

Weitere Hinweise

Chlorhexidin-haltige Produkte dürfen nicht mit Natriumhypochlorit-haltigen Produkten gemischt werden, da sich sonst ein schwerlöslicher, rotbrauner Niederschlag bildet.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Haltbarkeit

CHX-Endo 2% soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen

50 ml Lösung Artikel-Nr. 0032333
200 ml Lösung Artikel-Nr. 0032334
500 ml Lösung Artikel-Nr. 0032338

Stand der Information

2017-01


Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Chargenbezeichnung“

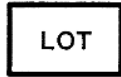

Symbol für „Bestellnummer“
Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an



Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“



1. Handhabung des ESD-Entnahmesystems mit Luer oder Luer-Lock Spritze



Verschlusskappe öffnen



Spritze aufsetzen



gewünschtes Volumen
aufziehen



Spritze abnehmen



Verschlusskappe
schließen

2. Direktes Ausgießen der Lösung (ohne Spritze) auch möglich.

0026333\Stückzahl0117\Bestelldatum