



Fachinformation

LEGASED natur

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

CE

Bezeichnung

LEGASED natur
Mund-Wund-Pflaster

Zusammensetzung

Naturharze (Myrrhe, Benzoe, Kolophonium), Ethanol, modifizierte Cellulose und Macrogol

Anwendungsgebiete

Viskose, filmbildende Flüssigkeit zum Auftragen als Schutzfilm bei leichten Entzündungen in der Mundhöhle, Druckstellen und Aphthen. Schützt vor mechanischem Druck und chemischen Reizen und lindert dadurch bestehenden Schmerz.

Gegenanzeigen

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Naturharzen, insbesondere Kolophonium oder einen der anderen Inhaltsstoffe.
Nicht in große offene Wunden (z.B. Alveolen) geben.

Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Warnhinweise

Enthält ca. 23 % Alkohol.

Bei versehentlichem Einbringen in die Augen, mit viel Wasser ausspülen und bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.

Verschüttete oder verspritzte Lösung möglichst rasch mit Alkohol oder einem anderen geeigneten Lösemittel (Achtung: kein Wasser oder Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden, das führt zur sofortigen Ausfällung) entfernen, da die enthaltenen Naturharze sonst verkleben und Flecken hinterlassen können.

Art der Anwendung

In der Zahnarztpraxis:

Die zu behandelnde Stelle trocken tupfen und zur besseren Haftung möglichst trocken halten.

Anschließend die Lösung mit einem geeigneten Instrument (z.B. Apply-Tip) auf die trockene Schleimhaut aufbringen (nicht einmassieren).

Bei Bedarf lässt sich die Lösung auch aus der Flasche in eine Einwegspritze aufziehen und mit einer stumpfen und nicht zu engen Kanüle gezielt auftragen.

Zu Hause und unterwegs:

Die zu behandelnde Stelle zur besseren Haftung des Schutzfilms möglichst vorher trocken tupfen (z.B. mit einem Papiertaschentuch). Anschließend die Lösung rasch mit einem Wattestäbchen oder

gegebenenfalls der sauberen Fingerkuppe großzügig auftragen (nicht einmassieren). Zur schnelleren

Filmbildung kann der Mund kurz mit Wasser ausgespült werden. Die Auftragung kann mehrmals täglich, besonders nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafen gehen erfolgen.

Weitere Hinweise

Die antibakterielle Barrierewirkung des Myrrharzes unterstützt die Wundheilung und Geweberegeneration in positiver Weise und trägt damit zur Schmerzlinderung bei.

Haltbarkeit

LEGASED natur soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Die Aufbrauchsfrist nach dem Öffnen des Behältnisses beträgt 6 Monate.

Lager- und Aufbewahrungshinweise

LEGASED natur ist stets gut verschlossen aufzubewahren.

Darreichungsform und Packungsgrößen

5 ml Lösung Artikel-Nr. 0032329
20 ml Lösung (Praxispackung) Artikel-Nr. 0032330

Stand der Information

2017-01

Wir wünschen Ihnen gute Besserung bei der Behandlung Ihrer Beschwerden!

Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Chargenbezeichnung“



Symbol für „Bestellnummer“
Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an



Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“



0026329/Stückzahl0117/Bestelldatum