



Fachinformation
FOKALDRY

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

CE 0124

Bezeichnung

FOKALDRY

Reinigungslösung für Kavität, Wurzelkanal und Zahnoberfläche.
Nur für zahnärztlichen Gebrauch

Zusammensetzung

Aceton, Isopropylalkohol, Petrolether und Diisopropylether

Anwendungsgebiete

Reinigung, Entfettung und Trocknung von Kavitäten, Zahnstümpfen, Wurzelkanälen, Kronen, Brücken und Bändern (Brackets).
Entfernung von Belägen auf der Zahnhartsubstanz. Entfernung von noch nicht ausgehärteten Zement- und Kompositresten.

Hinweis

Beim Einatmen größerer Mengen können Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühl auftreten.

Art der Anwendung

Ein Wattepellet geeigneter Größe mit FOKALDRY tränken und damit die Kavität bzw. den Zahnstumpf säubern.
Kronen, Brücken und Bänder (Brackets) vor dem endgültigen Einsetzen mit FOKALDRY reinigen.
Den Wurzelkanal mit FOKALDRY befeuchten, Flüssigkeitsreste mit einer Papierspitze aufnehmen.
FOKALDRY hinterlässt nach der Verdunstung keinen schmierigen Film.
Beim Reinigen des Wurzelkanals darauf achten, dass die Lösung nicht über den Apex in das periapikale Gewebe gelangt.

Weitere Hinweise

Die Zweckbestimmung von FOKALDRY besteht darin, fetthaltige Reste von Zahnpräparationen, sowie Feuchtigkeit zu entfernen, um eine bessere Adaption bzw. Verbund mit dem Unterfüllungs- bzw. Füllungsmaterial und Befestigungszementen zu erhalten.

Haltbarkeit

FOKALDRY soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Lager- und Aufbewahrungshinweis

Nach dem Gebrauch die Flasche sofort wieder verschließen und vor Licht geschützt aufbewahren.
FOKALDRY ist eine leicht brennbare Flüssigkeit, daher nicht in der Nähe von Zündquellen handhaben oder aufbewahren. Bei größeren Mengen verdunsteter Flüssigkeit für ausreichende Lüftung sorgen.

Darreichungsform und Packungsgrößen

80 ml Lösung Artikel-Nr. 0032305
500 ml Lösung (480 ml Vorratsflasche und 20 ml Gebrauchsflasche) Artikel-Nr. 0032306

Stand der Information
2018-02

Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Chargenbezeichnung“



Symbol für „Gebrauchsanweisung“ beachten



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Bestellnummer“
Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an



0026305/Stückzahl0218/Bestelldatum