



Fachinformation

ORBAT sensitive

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

CE

Bezeichnung

ORBAT sensitive
Flüssigkeit zur Zahnfleischretraktion

Zusammensetzung

Aluminiumsulfat-Lösung 25 %

Anwendungsgebiete

Zur Retraktion des Zahnfleisches.
Zur Stillung von Zahnfleischblutungen und Stoppen der Exsudation vor der Abdrucknahme.
Zum Zahnfleischmanagement bei direkten und indirekten Restaurationen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Nicht anwenden bei Patienten mit einer Allergie gegen Aluminiumverbindungen.
Nicht mit imprägnierten Retraktionsfäden benutzen.
Aluminiumsulfat kann zu leichten Abschilferungen am Schleimhautepithel führen.
Bei versehentlichem Einbringen in die Augen, mit viel Wasser ausspülen und bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.

Art der Anwendung

Retraktion des Zahnfleisches

Zur Zahnfleischretraktion vor Abdrucknahme einen nicht imprägnierten Retraktionsfaden (-ring) mit ORBAT sensitive tränken. Nach ca. 1 - 3 Minuten (oder auch länger) Faden entfernen und bei Bedarf vorsichtig spülen.

Exsudation und Zahnfleischbluten

Exsudat bzw. Blut abtupfen und ORBAT sensitive mit getränktem Wattepellet oder einem anderen geeigneten Applikator unter leichtem Druck auftragen.

Zahnfleischmanagement bei direkten und indirekten Restaurationen

Falls stärkere Kapillarblutungen zu Stillen sind, sollte eher ORBAT forte zur Retraktion und zum Stoppen der Zahnfleischblutung angewandt werden.
Ansonsten zur Retraktion und zum Stoppen der Exsudation ORBAT sensitive direkt mit einem geeigneten Applikator einreiben oder einen getränkten Retraktionsfaden (-ring) in den Sulkus legen.
Vor der Zementierung bzw. der adhäsiven Befestigung der Restauration muss sichergestellt sein, dass die Blutung und Exsudation gestoppt sind und überschüssiges Aluminiumsulfat gut entfernt wurde.

Weitere Hinweise

Aluminiumsulfat hat eine gute adstringierende Wirkung. Es bewirkt eine lokale Blutstillung, indem es die obere Zahnfleischschicht zusammenzieht.

ORBAT sensitive kann auch direkt aus der Tropfflasche auf den Applikator oder geeignete Retraktionsfäden aufgebracht werden.

Besser ist es jedoch, aus der Flasche einige Tropfen in ein Dappenglas oder Ähnliches zugeben, um dort die zugeschnittenen Fäden gut zu tränken oder die Lösung mit dem Applikator von dort zu entnehmen.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nur für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch.

Haltbarkeit

ORBAT sensitive soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Lager- und Aufbewahrungshinweise

Keine

Darreichungsform und Packungsgröße

20 ml Lösung in PE - Tropfflasche Artikel-Nr. 0032327

Stand der Information

2017-07


Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Chargenbezeichnung“

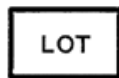

Symbol für „Bestellnummer“

Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an



Symbol für „Gebrauchsanweisung“ beachten



0026327/Stückzahl0717/Bestelldatum