



Fachinformation

ORBAT forte

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de
beachten

CE

Bezeichnung

ORBAT forte
Flüssig-Gel zur Blutstillung und zur Zahnfleischretraktion.

Zusammensetzung

Eisen(III)sulfat-Flüssig-Gel 20 %

Anwendungsgebiete

Zur Retraktion des Zahnfleisches.
Zum Zahnfleischmanagement bei direkten und indirekten Restaurationen.
Zur Blutstillung vor der Abdrucknahme.
Zur Stillung von Papillenblutungen.
Zur Blutstillung in der Endodontie.

Nebenwirkungen

Nicht anwenden bei Patienten mit einer Allergie gegen Eisensulfat.
Eisensulfat kann vorübergehend zu leichten Abschilferungen am Schleimhautepithel führen.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht mit Epinephrin vermischen.
Nicht mit imprägnierten Retraktionsfäden verwenden.
Zur besseren Wiederentfernbarkeit, das mit dem Flüssig-Gel behandelte Areal nicht zu trocken werden lassen (nicht Trockenblasen oder Trockensaugen).
Eisensulfathaltige Mittel können die Abbindung von Abformmaterialien und die Haftkraft von Adhäsiven beeinträchtigen. Deshalb vor der Weiterbehandlung das Gel gründlich mit viel Wasserspray entfernen. Aufgetretene Verfärbungen sorgfältig mit Wasserspray und z.B. der REMOT Polierpaste entfernen.
Verschlucken vermeiden. Nach Verschlucken Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautkontakt behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Produktkontakt mit Kleidung ist zu vermeiden.
Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.legeartis.de heruntergeladen werden oder per E-Mail unter sicherheitsdatenblaetter@legeartis.de angefordert werden.

Art der Anwendung

Retraktion des Zahnfleisches / Blutstillung vor der Abdrucknahme

Zur Zahnfleischretraktion vor der Abdrucknahme einen nicht imprägnierten Retraktionsfaden (-ring) mit ORBAT forte tränken. Den in den Sulkus gelegten Faden nach mindestens 1 - 3 Minuten entfernen und bei Bedarf vorsichtig spülen.
ORBAT forte kann zur Blutstillung vor der Abdrucknahme direkt mit einem Applikator auf das Gewebe unter leichtem Druck aufgetragen werden.

Zahnfleischmanagement bei direkten und indirekten Restaurationen / Stillung von Papillenblutungen

Zum Stoppen von Blutungen und des Nachfließens von Sulkusflüssigkeit wird ein mit ORBAT forte getränkter Retraktionsfaden in den Sulkus eingebracht oder ORBAT forte wird direkt mit einem geeigneten Applikator (Mikro-Applikator oder Wattepellet) unter leichtem Druck aufgetragen.

Vor der Zementierung bzw. der adhäsiven Befestigung der Restauration muss sichergestellt sein, dass die Blutung und der Sulkusfluss gestoppt sind und überschüssiges Eisensulfat-Flüssig-Gel sowie eventuell vorhandene Koagel gründlich mit viel Wasserspray entfernt wurden.

Blutstillung in der Endodontie

ORBAT forte kann auch zur Blutstillung bei Pulpotomien oder endodontischen Behandlungen wie retrograden Wurzelfüllungen eingesetzt werden. Vor der Weiterbehandlung sollte jedoch sichergestellt werden, dass das vorhandene Eisensulfat-Flüssig-Gel und gebildete Koagel gründlich mit viel Wasserspray entfernt wurden.

Weitere Hinweise

Eisensulfat hat eine gute adstringierende und koagulierende Wirkung. Es bewirkt eine lokale Blutstillung, indem es die Gingiva oberflächlich zusammenzieht und mit austretendem Blut ein Koagel bildet.

ORBAT forte kann direkt aus der Tropfflasche auf den Applikator oder geeignete Retraktionsfäden aufgebracht werden. Bevorzugt werden einige Tropfen Flüssig-Gel aus der Flasche in ein Dappenglas oder einen ähnlichen Medikamentenbehälter gegeben, um dann die zugeschnittenen Fäden gut zu tränken oder das Flüssig-Gel mit dem Applikator daraus zu entnehmen.

Die Viskosität des Flüssig-Gels verhindert ein schnelles Ablaufen vom Faden, dem Applikator und Applikationsort.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nur für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch.

Flüssig-Gel-Reste nicht zurück ins Gefäß geben.

Haltbarkeit

ORBAT forte soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Lager- und Aufbewahrungshinweise

Nach dem Gebrauch die Flasche sofort wieder verschließen.

Darreichungsform und Packungsgröße

20 ml Flüssig-Gel in PE - Tropfflasche Artikel-Nr. 0032336

Stand der Information

2019-11


Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Chargenbezeichnung“

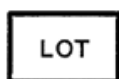

Symbol für „Bestellnummer“

Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an



Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“

