



Fachinformation
CALCIPRO

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

CE 0124

Bezeichnung

CALCIPRO

Pulver zur Herstellung einer Calciumhydroxidpaste, röntgensichtbar, in individuell gewünschter Konsistenz

Nur für zahnärztlichen Gebrauch

Zusammensetzung

90 % Calciumhydroxid
Bariumsulfat

Anwendungsgebiete

CALCIPRO, unmittelbar vor Anwendung mit dest. Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung zu einer Paste angespatelt, dient der direkten Überkappung der Pulpa sowie als temporäre Wurzelkanaleinlage.

Gegenanzeigen

Für die Anwendung bei der direkten Überkappung sind keine Gegenanzeigen bekannt, insofern die Erhaltungsfähigkeit der Pulpa diagnostiziert wurde. Bei sachgerechter Anwendung als temporäre Wurzelkanaleinlage bestehen keine Gegenanzeigen.

Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Anwendung als temporäre Wurzelkanaleinlage ist darauf zu achten, dass CALCIPRO nicht über den Apex hinaus gebracht wird.

Calciumhydroxid wirkt ätzend auf Haut und Schleimhäute. Bei Kontakt mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Ausschlag ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken vermeiden. Nach Verschlucken Mund ausspülen.

Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt Partikel nach Möglichkeit mechanisch entfernen und anschließend sofort mit viel Wasser spülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.legeartis.de heruntergeladen werden oder per E-Mail unter sicherheitsdatenblaetter@legeartis.de angefordert werden.

Art der Anwendung

CALCIPRO gestattet dem Anwender, unmittelbar vor Gebrauch die Calciumhydroxid-Paste rasch und unkompliziert in der von ihm gewünschten Konsistenz herzustellen. Hierzu werden auf der Glasplatte oder dem Anmischblock wenige Tropfen dest. Wasser oder physiologische Kochsalzlösung vorgelegt, das CALCIPRO Pulver portionsweise zugegeben und mit dem Spatel bis zur gewünschten Konsistenz ausgearbeitet.

Anschließend die frisch angerührte Suspension/Paste mit geeigneten Instrumenten und geeigneter Technik zur direkten Überkappung auf die Pulpa aufbringen oder als temporäre Wurzelkanaleinlage in den

Wurzelkanal einbringen (z.B. mit Füllspirale oder Millernadel). Zum Schutz von Gingiva und Mundschleimhaut Kofferdam verwenden.

Die Röntgensichtbarkeit von CALCIPRO ermöglicht die Qualitätskontrolle und erhöht die Anwendungssicherheit.

Weitere Hinweise

Calciumhydroxid erzeugt auf vitalem Gewebe eine oberflächliche Koagulationsnekrose. Diese lokal begrenzte Nekrose induziert durch eine erhöhte Odontoblastenaktivität der Pulpa die Bildung von reparativem Dentin (direkte Überkappung). Ähnlich wird bei Kontakt mit dem apikalen Gewebe die Ausbildung einer Hartsubstanzbarriere induziert. Nach Applikation in den aufbereiteten Wurzelkanal begünstigt CALCIPRO die Ausheilung apikaler Läsionen der Apexifikation. Bei der indirekten Überkappung entsteht unter der belassenen Dentinschicht eine Sekundärdentinschicht. Pastös angemischt dient CALCIPRO als raumausfüllende, trocknende und antimikrobielle Einlage im Wurzelkanal.

Pulverreste nicht zurück ins Gefäß geben.

Haltbarkeit

CALCIPRO soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Lager- und Aufbewahrungshinweis

CALCIPRO Pulver ist stets gut verschlossen aufzubewahren. Zur Entnahme aus dem Vorratsgefäß immer ein trockenes Instrument, z.B. Anmischspatel verwenden.

Darreichungsform und Packungsgröße

10 g Pulver Artikel-Nr. 0032318

Stand der Information

2020-07

Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Chargenbezeichnung“



Symbol für „Bestellnummer“
Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an



Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“



Symbol für „Medizinprodukt“

